


AERODESIN 2000

Preparat do
szybkiej dezynfekcji
nieinwazyjnych
wyróbów medycznych
odpornych na działanie
alkoholi.

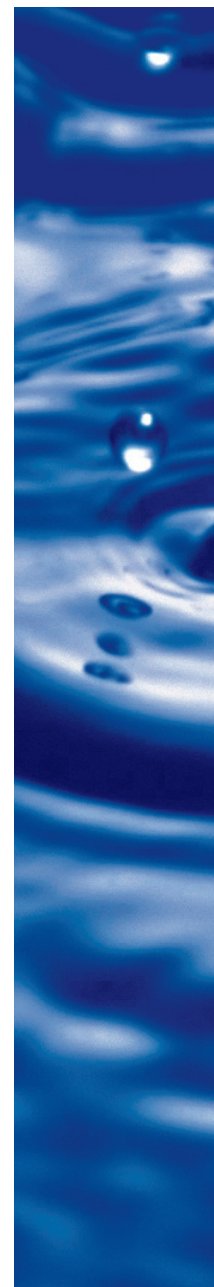

- preparat na bazie alkoholi
- szerokie spektrum biobójcze
- krótki czas działania
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- przyjemny, delikatny zapach
- błyskawicznie schnie
- nie pozostawia żadnych śladów
- ponad 20 lat na rynku

Preparat gotowy do użycia



Wyrób medyczny kl. IIa, CE 0482



AERODESIN 2000

Preparat do szybkiej dezynfekcji nieinwazyjnych wyrobów medycznych odpornych na działanie alkoholi.

PODSTAWOWE CECHY

- produkt gotowy do użycia
- kompozycja na bazie alkoholi z dodatkiem glutaraldehydu
- szerokie spektrum biobójcze: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy i wirusobójczy
- wykazuje działanie przy bardzo krótkim 1 minutowym czasie kontaktu
- zalecany do powierzchni odpornych na działanie alkoholi
- do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością
- wygodna i szybka forma aplikacji preparatu
- możliwość użycia produktu poprzez rozpylenie, jak i przy użyciu ściereczki
- preparat po aplikacji nie tworzy tłustego nalotu, łatwo się rozprowadza
- po zastosowaniu szybko schnie nie pozostawiając żadnych śladów
- charakteryzuje się przyjemnym, delikatnym zapachem
- sprawdzony preparat z 20 letnią historią na rynku polskim

SKŁAD

100 g preparatu zawiera: 32,5 g propan-1-ol, 18 g etanol, 0,1 g glutaraldehyd

SKUTECZNOŚĆ BIOBÓJCZA

- 1 minuta: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy [HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliowirus]
- 30 minut: bakteriobójczy, prątkobójczy, grzybobójczy, wirusobójczy [HIV, HBV, HCV, Adenowirus, Norowirus, Vacciniawirus, Poliowirus, Poliomawirus]

SPOSÓB UŻYCIA

- Preparat do użytku profesjonalnego.
- Gotowy do użycia – nie rozcieńczać.
- Stosować na niezanieczyszczone organicznie powierzchnie.
- Nanosić na dezynfekowane powierzchnie bezpośrednio z butelki przy użyciu końcówki spryskującej z odległości 30 cm lub za pomocą nasączonej ściereczki [zalecane jednorazowe chusteczki włókninowe Medilab].



1. Preparat równomiernie zaaplikować na całej dezynfekowanej powierzchni lub równomiernie rozprowadzić za pomocą chusteczki.
2. Nie wycierać, pozostawić do wyschnięcia. Odczekać min. 1 minutę.
3. Powierzchnie mające kontakt z żywnością zmyć dokładnie wodą zdatną do picia.

OPAKOWANIA

- Aerodesin 2000: butelka 1 litr ze spryskiwaczem
- Aerodesin 2000: kanister – 5 litrów
- Wyposażenie dodatkowe: jednorazowe chusteczki włókninowe

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR

PRODUCENT: Lysoform GmbH, Niemcy

DYSTRYBUTOR W POLSCE: Medilab Sp. z o.o. • ul. Niedźwiedzia 60 • 15-531 Białystok • tel.: 85 747 93 00 • fax: 85 747 93 12 • www.medilab.pl

