



ANIOSYME DD1

PREPARAT DO MYCIA I DEZYNFEKCJI NARZĘDZI,
ENDOSKOPÓW I INNYCH WYROBÓW MEDYCZNYCH


INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I STOSOWANIA ROZTWORU ROBOCZEGO



1

Przygotowanie 0,5% roztworu roboczego Aniosyme DD1:

- napełnić wannenę dezynfekcyjną zimną lub letnią wodą
- na każdy litr wody wlać 5 ml koncentratu:
 - butelka 1 litrowa – użyć dozownik przelewowy z podziałką
 - kanister 5 litrowy – użyć pompki (jedno naciśnięcie pompki to 25 ml koncentratu na 5 litrów wody)

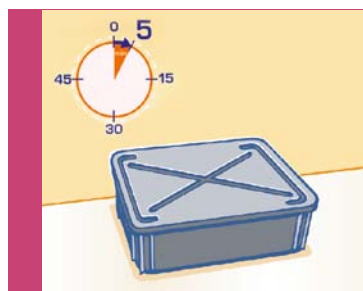

2

Wyroby medyczne (np. narzędzia, endoskopy) całkowicie zanurzyć w roztworze roboczym.

Wannenę dezynfekcyjną przykryć.

Odczekać 5 minut.



3

Po upływie 5 minut zdezynfekowane wyroby medyczne wyjąć. W razie konieczności narzędzia doczyścić szczoteczką.



4

Dokładnie opłukać wyroby medyczne pod bieżącą wodą.



5

Osuszyć wyroby medyczne i poddać dalszym procesom higienicznym zgodnym z procedurą.