

## I. Zastosowanie

Kształtki rehabilitacyjne są przeznaczone do rehabilitacji kobiet w ciąży. Kształtki rehabilitacyjne pozwalają na poprawne ułożenie kobiet podczas rehabilitacji czy też masażu. Zapewnia pełną wygodę zarówno w leżeniu na boku jak i na brzuchu, poprawiając skuteczność podczas wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych, fizjoterapii, masażu mających na celu leczenie lub łagodzenie przebiegu chorób oraz skutków urazu.

Kształtki rehab. wykonane z pianek z optymalnej sprężystości i odporności na odkształcenia.

## II. Budowa



## III. Obsługa

1. Wyciągnąć kształtki oraz elementy podglówka z pokrowca (jeśli występuje).
2. Rozłożyć kształtki na płaskiej, stabilnej płaszczyźnie (np. stół rehabilitacyjny) według układu wskazanego na zdjęciu.
3. Kształtki z wycięciem na brzuch ustawić w odległości odpowiadającej rozmiarom brzucha pacjentki. Rozstawienie to powinno gwarantować komfort i swobodę ciężarnej pacjentki podczas zabiegu. Kształtki połączyć ze sobą systemem pasów regulujących i rzep.
4. Następnie należy zainstalować i wyregulować podglówek.
5. Po ułożeniu pacjentki ostatecznie dopasować rozłożenie kształtek - podkolaników, klinów pod kończyny dolne oraz wszystkich pozostałych kształtek do jej budowy ciała.

## IV. Konserwacja i czyszczenie

**Elementy chromowane i lakierowane.** Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

## V. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie.

## VI. Zalecenia

1. Użytkować kształtki zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

Data sporządzenia instrukcji: lipiec 2015

instrukcja obsługi zestawu kształtek  
do masażu ciążowego

 **HABYS**®  
— for perfect massage



HABYS Sp. z o.o.  
38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 1  
e-mail: [biuro@habys.pl](mailto:biuro@habys.pl), [www.habys.pl](http://www.habys.pl)  
tel.: +48 13 44 62 788, fax: +48 13 44 58 350