


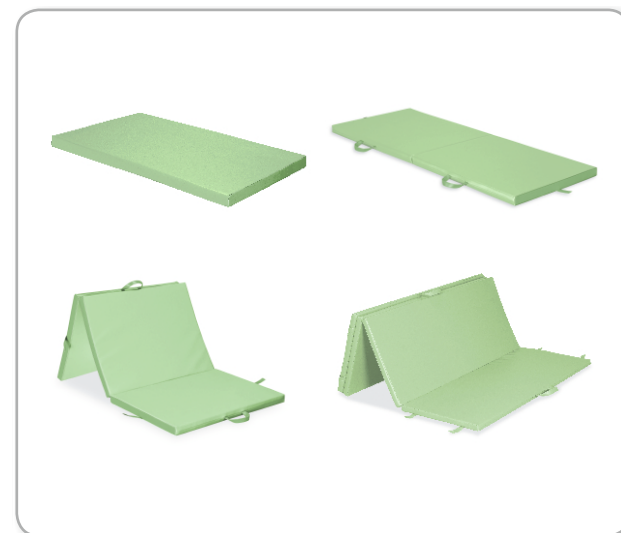

HABYS Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 1
e-mail: biuro@habys.pl, www.habys.pl
tel.: +48 13 44 62 788, fax: +48 13 44 58 350

I. Zastosowanie

Materace przeznaczone są do wykonywania zabiegów rehabilitacyjnych w celu łagodzenia skutków urazów, a także w zabiegach fizjoterapeutycznych. Materace wykorzystywane mogą być w gabinetach lekarskich i odnowy biologicznej, ośrodkach zdrowia, w domu u pacjenta.

II. Budowa

Materace wykonane z twardej pianki poliuretanowej, pokryte dzianiną powlekaną. Materace 2, 3, 4-częściowe dodatkowo posiadają rzepy zabezpieczające oraz uchwyty transportowe.

III. Akcesoria

1. Pokrowiec na materac 3-częściowy (Poz. 1.1)
2. Pokrowiec na materac 4-częściowy (Poz. 1.2)

IV. Uwagi eksploatacyjne

1. Materace przeznaczone są do użytku wewnątrz pomieszczeń suchych i zamkniętych oraz do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
2. Nie dopuszcza się przenoszenia materaców wraz z pacjentem.
3. Materace powinny być użytkowane i przechowywane z dala od bezpośrednich źródeł ognia i ciepła.
4. Właściwe użytkowanie materacy zapewni Państwu długą i bezawaryjną eksploatację.
5. Uszkodzenia powstałe w skutek niestosowania się do powyższych uwag nie są podstawą do reklamacji.
6. Użytkować materace zgodnie z instrukcją obsługi.
7. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

V. Dane techniczne

Nazwa	Długość	Szerokość	Wysokość	Waga	Wymiary po złożeniu
Materac 1-częściowy	195 cm	100 cm	5 cm	6,2 kg	-
	195 cm	100 cm	10 cm	11,2 kg	-
Materac 2-częściowy	170 cm	65 cm	5 cm	3,5 kg	85x65x10 cm
Materac 3-częściowy	195 cm	85 cm	5 cm	5,45 kg	85x65x15 cm
	195 cm	100 cm	15 cm	6,8 kg	100x65x15 cm
Materac 4-częściowy Shiatsu	200 cm	120 cm	3 cm	5,4 kg	120x50x12 cm



Poz. 1