

IV. Ułożenie pacjenta

Pacjent siada na siedzisko (3), kolana układa na podkolannikach (4), pochyla się do przodu, ręce opiera na półce pod ramiona (5) a twarz umieszcza w poduszce podgłówna (7).

V Czystczenie i dezynfekcja

Elementy chromowane i lakierowane. Do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Przed zabiegiem należy sprawdzić prawidłowość rozstawienia stelaża oraz stan techniczny i naciąg linki.
2. Krzesło przeznaczone jest do zabiegów tylko dla jednej osoby jednocześnie.
3. Nie dopuszcza się przenoszenia krzesła wraz z pacjentem.
4. Zabrania się gwałtownego siadania na krzesło (wskakiwania).
5. Nie należy regulować wysokości sprężyny gazowej przy pełnym obciążeniu.
6. Podczas korzystania z krzesła, stelaż półki pod ramiona (5) nie może opierać się o stelaż krzesła.
7. Poduszka lub klin pod klatkę piersiową nie powinny być stosowane jako uchwyt.
8. Krzesło użytkować zgodnie z instrukcją obsługi.
9. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

VII. Dane techniczne

Szerokość (u podstawy)	50 cm
Głębokość (u podstawy)	63 - 78 cm
Wysokość regulowana (z podgłówkiem)	110 - 137 cm
Wysokość od podłoża do siedziska	55 - 61
Waga bez wyposażenia	9 kg
Dopuszczalne obciążenie	150 kg

instrukcja obsługi krzesła rehabilitacyjnego






Prestige-reh

HABYS Sp. z o.o.
38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 1
e-mail: biuro@habys.pl, www.habys.pl
tel.: +48 13 44 62 788, fax: +48 13 44 58 350

I. Zastosowanie

Krzesła rehabilitacyjne są wykorzystywane w leczeniu lub łagodzeniu przebiegu chorób oraz urazów poprzez umożliwianie prowadzenia skutecznych i bezpiecznych zabiegów rehabilitacyjnych, terapeutycznych i masażu.


II. Budowa krzeseł

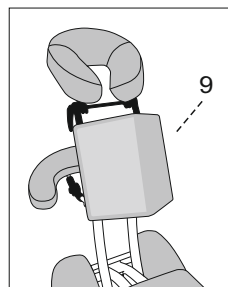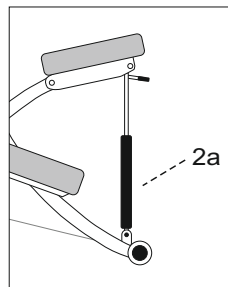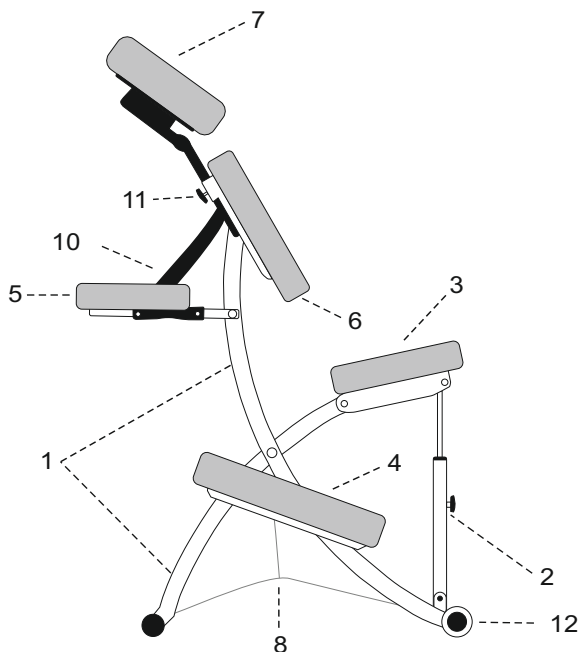

1. Stelaż krzesła
2. Regulacja skokowa
- 2a. Regulacja sprężyną gazową (opcja)
3. Siedzisko
4. Podkolanniki
5. Półka pod ramiona
6. Poduszka piersiowa
7. Podglówek regulowany
8. Linka zmiany wysokości
9. Kształtka pod klatkę piersiową (opcja)
10. Regulacja położenia półki - pasek
11. Gałki regulujące wysokość podglówka
12. Kółka transportowe

III. Obsługa

1. Rozkładanie, składanie i transportowanie krzesła.

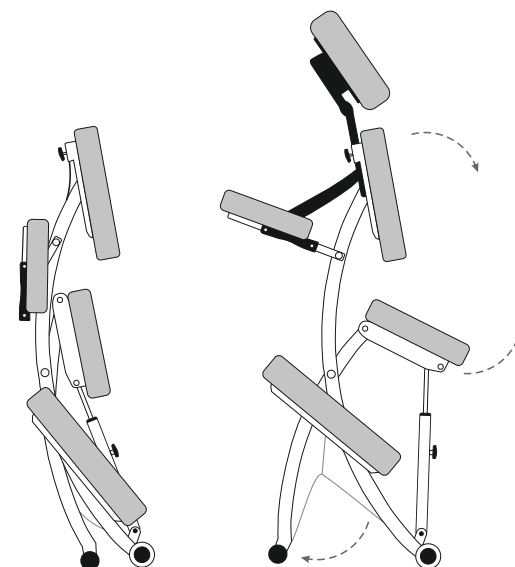

Trzymając jedną ręką stelaż za poduszkę piersiową (6) a drugą za siedzisko (3) należy lekko pociągając otworzyć krzesło, rozsuwając podstawy stelaża na boki.

Składać analogicznie, zwracając uwagę, aby podstawy stelaża / nogi zetknęły się ze sobą. Nieprawidłowe złożenie krzesła uniemożliwi włożenie go do pokrowca.

Krzesło można transportować w przeznaczonym dla niego futerale lub dzięki zaczepieniu paska transportującego bezpośrednio w stelażu krzesła.

2. Regulacja wysokości krzesła i kąta nachylenia siedziska

Wysokość regulujemy za pomocą regulatora wysokości znajdującego się na linie stalowej (8), a kąt nachylenia siedziska (3) za pomocą sprężyny gazowej (2a) lub regulacji skokowej (2).

3. Regulacja położenia półki pod ramiona (5)

Wcisnąć 2 przeciwległe przyciski pod półką i ustawić ją w żądanym położeniu. W celu jej wypoziomowania należy wydłużyć lub skrócić pas mocujący.

4. Regulacja położenia podglówka (7)

Podglówek regulowany (7) przymocowany jest do krzesła za pomocą dwóch gałek motylkowych. Aby przemieścić podglówek należy odkręcić obydwie gałki, wysunąć podglówek na żądaną wysokość, po czym powtórnie zakręcić gałki.

5. Kształtka pod klatkę piersiową (9) (wypożyczenie dodatkowe)

Zalecana w masażu kobiet ciężarnych lub z dużym biustem. Montaż polega na odczepieniu poduszki piersiowej (6) i zastąpieniu jej klinem piersiowym mocowanym na rzepach.