

## I. Zastosowanie

Schodki drewniane znajdują swoje zastosowanie w gabinetach lekarskich, szpitalach, salonach masażu w celu ułatwienia wejścia lub zejścia z leżanek.

## II. Obsługa

1. Ustawić schodek na twardym podłożu.
2. Czynności podczas wchodzenia lub schodzenia ze schodka asekurowe masażysta lub opiekun.

## III. Konserwacja i czyszczenie

Elementy chromowane i lakierowane - do czyszczenia takich elementów zalecane są produkty nie zawierające środków ściernych. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

## IV. Dezynfekcja

Dezynfekować w razie potrzeby i sporadycznie. Przykładowe środki dezynfekujące dostępne w naszej ofercie: Incidur Spray, Incidin Foam Spray, chusteczki Sani Cloth Active.

## V. Zalecenia

1. Użytkować schodek zgodnie z instrukcją obsługi,
2. Zapoznać się z warunkami gwarancji i ich przestrzegać.

## VI. Uwagi eksploatacyjne

1. Schodek przeznaczony jest dla jednej osoby jednocześnie.
2. Zabrania się gwałtownego wskakiwania na schodek.

## VII. Dane techniczne

Wysokość	20 cm
Szerokość	45 cm
Głębokość	25 cm
Waga	3 kg

# instrukcja obsługi schodków drewnianych



HABYS Sp. z o.o.  
38-200 Jasło, ul. Przemysłowa 1  
e-mail: [biuro@habys.pl](mailto:biuro@habys.pl), [www.habys.pl](http://www.habys.pl)  
tel.: +48 13 44 62 788, fax: +48 13 44 58 350