

Detro® San AF Wipes

Gotowe do użycia, bezalkoholowe chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych

- Bez zawartości alkoholu
- Skuteczność w warunkach brudnych
- Szeroka kompatybilność materiałowa
- Szybki czas działania – 1 minuta

KLASYFIKACJA PRODUKTU

WYRÓB MEDYCZNY KL. IIIA, CE 2195

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Szybka dezynfekcja oraz mycie powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych, stetoskopów, kozetek, stolików, mebli medycznych, łóżek, sprzętu rehabilitacyjnego, stomatologicznego oraz unitów. Detro®san AF Wipes jest kompatybilny ze wszystkimi powierzchniami wodoodpornymi, szkłem, plexą, powierzchniami drewnianymi, silikonem, materiałami ze stali nierdzewnej, ceramiką, a także z powierzchniami wrażliwymi na działanie związków utleniających.



To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Ulotka informacyjna przeznaczona dla użytkownika profesjonalnego.

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230



SPEKTRUM DZIAŁANIA

Metoda badania	Zakres skuteczności bójczej	Czas kontaktu
EN 13727	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae, E. coli)	1 min.
EN 16615	Bakteriobójczy (P. aeruginosa, S. aureus, E. hirae)	1 min.
EN 13624	Grzybobójczy (C. albicans, A. niger)	1 min.
EN 16615	Drożdżakobójczy (C. albicans)	1 min.
EN 14348	Pratkobójczy (M. avium, M. terrae)	1 min.
EN 14476	Wirusobójczy (Adeno, Polio, Noro)	1 min.

SKŁAD

N-(3-aminopropylo)-N-dodecylopropano 1-3 diamina, Chlorek alkilodimetylobeznyloamonowy, Chlorek didecyldiemtyloamonowy.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

1. Preparat do użytku profesjonalnego.
2. Produkt w formie chusteczek. Gotowe do użycia.
3. Otworzyć opakowanie i wyjąć chusteczkę.
4. Chusteczki odrywać pojedynczo.
5. Przetrzeć chusteczką całą dezynfekowaną powierzchnię.
6. Odczekać zalecany czas ekspozycji w celu uzyskania efektu bójczego.
7. Pozostawić do wyschnięcia.
8. Po użyciu pojemnik z chusteczkami szczelnie zamknąć.
9. Przed użyciem należy zapoznać się z treścią ulotki, etykiety i karty charakterystyki.

OPAKOWANIA

Opakowanie	REF / Nr katalogowy	Pojemność	Opak. zbiorcze	EAN
Tuba	S-M.DET.4.0010	100 szt.	12	8680097103864
Flow-pack	S-M.DET.4.0029	200 szt.	12	8680097104229

PRODUCENT

Detro Healthcare Kimya Sanayi A.Ş.
Atatürk mah. Cemal Gürsel Cad. No:8,
34522 Kiraç, 34522 Esenyurt/İstanbul, Turcja

DYSTRYBUTOR

Polmil Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 8
85-758 Bydgoszcz
www.polmil.pl

PARTNER STRATEGICZNY

Medi-Pro Sp. z o.o.
ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa
+48 22 811 03 22,
www.medi-pro.com.pl



Jesteśmy do Państwa dyspozycji, aby udzielić kompleksowych informacji na temat naszych produktów. Prosimy o skontaktowanie się z naszym działem handlowym w celu uzyskania szczegółów. Zadzwoń: 22 811 03 22 lub napisz: biuro@medi-pro.com.pl

Medi-Pro Sp. z o.o.

📍 ul. Wysockiego 6b, 03-371 Warszawa 📞 +48 22 811 03 22 🌐 www.medi-pro.com.pl
NIP: 524-040-80-22 KRS: 0000089304 BDO: 000402949 SRN: PL-IM-00026230

